

MAFF2 – FFP2 NR

Benutzungsanweisung für Atemmasken ohne Ausatemventil FFP2 NR zur einmaligen Verwendung:

ATEMSCHUTZMASKE FFP2 NR

Partikelfiltrierende Halbmaske der Effizienzklasse FFP2 NR Marke: F-MASK – Model: MAFF2

Bezug :
MAFF2-2020-4P (Größe 245 mm, Schichten SME, SF, SI)
MAFF2-2021-4P (Größe 225 mm, Schichten SME, SF, SI)

Benannte Stelle: APAVE SUDEUROPE SAS

Benannte Stelle, die am EU-Musterprüfungsmodul (B) und an der jährlichen Qualitätssicherungskontrolle des Modultyps Produktionsmodus (C2) gemäß der Verordnung 2016/425/EU beteiligt ist.

APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 – 13332 Marseille Cedex 16 – France

EN149:2001+A1:2009



Diese Maske entspricht den Anforderungen der:

EU-Verordnung: 2016/425 et 2017/745

Diese Maske wurde bewertet nach:

EN149: 2021+A1: 2009

EN14683: 2019

Datum der ersten Anbringung der CE-Kennzeichnung: 05/01/2021

Hinweis: Die Normen und die Ergebnisse unserer Tests können von unserer Website www.prism-medical-protect.fr heruntergeladen werden, indem Sie sich unter dem Reiter "Verbindung" registrieren.

Aufgrund der Angaben zur Konformität und Bewertung ist die Maske FFP2 NR eine in der Industrie einsetzbare PSA (Persönliche Schutzausrüstung).

Die Maske ist auch ein MP (Medizinprodukt) der Klasse I, verwendbar in der Krankenhausumgebung, für medizinisches Personal, Patienten und Besucher der Krankenhausumgebung.

Die Maske ist auch ein DM (Medizinprodukt) der Klasse I, das in Krankenhäusern, medizinischen Fachkräften, Patienten und Krankenhausbesuchern verwendet werden kann.

TYPOLOGIE:

FFP2 NR Effizienzklasse filtrierende Halbmaske, Typ "Duckbill", Einwegmaske, unsteril, nicht wiederverwendbar.

EMPFEHLUNGEN:

Sie soll den Träger vor dem Einatmen von Tröpfchen und luftgetragenen Partikeln (Aerosole) schützen.

Diese Maske dient zum Schutz des Trägers vor Staub und Aerosolen (feine, in der Luft schwebende Tröpfchen).

BENUTZUNGSWEISUNG:

- Maske zum einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwendbar, für maximal 8 Stunden.



- Karton nach Gebrauch schließen.

- Die Maske ist nach Gebrauch in einem dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen und nicht in der Natur.

- Bei Atemwegserkrankungen, dermatologischen und allergischen Problemen, psychiatrischen Störungen, Menschen mit Autismus und anderen Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

VOR DER BENUTZUNG:



- Prüfen Sie den Karton vor dem Öffnen gründlich.

- Prüfen Sie auf Feuchtigkeit oder Schimmel.

- Stellen Sie sicher, dass die Box nicht zerdrückt oder beschädigt ist.

- Tauschen Sie im Zweifelsfall die Einheit oder die Box aus.

- Lesen Sie die Anweisungen und fragen Sie einen Arzt,

HINWEIS:

- Die Halbmaske ist nicht zum Schutz des Trägers vor Gasen bestimmt.

- Der Gesichtsschutz kann nicht in einer explosiven Atmosphäre verwendet werden.

- Es ist unwahrscheinlich, dass die Anforderungen an die Gesichtsdichtung erfüllt werden, wenn Gesichtsbehaarung unter die Gesichtsdichtung gelangt.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

- Das Produkt enthält nicht gewebte Bestandteile, bei Menschen mit Allergien vorsichtig verwenden.

- In intensiven Arbeitssituationen sollte die Maske lediglich 15 Minuten getragen werden.

- Die Halbmaske sollte nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen Gefahr von Sauerstoffmangel besteht.

- Wenn die Maske beschädigt ist oder die Atmung erschwert ist, wechseln Sie die Maske.

Die EU-Konformitätserklärung und das Technische Datenblatt können heruntergeladen werden über:

www.prism-medical-protect.fr oder per Mail : qualite@prism-medical-protect.fr

Bei allen Reklamationen senden Sie bitte einen Brief unter Angabe der Chargennummer und der Maskennummer an:


SAS PRISM, ZI du Barnier, 51 rue des Paluds - 34110 FRONTIGNAN - Frankreich




BENUTZUNGSANWEISUNG:




1
Trennen Sie die Kanten der Maske, um sie vollständig zu öffnen.

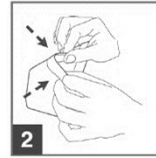


2
Biegen Sie die Nasenklammer, um die Atemschutzmaske offen zu halten.

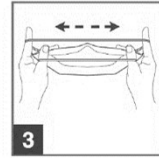


3
Ziehen Sie die Gummibänder mit Zeigefinger und Daumen auseinander

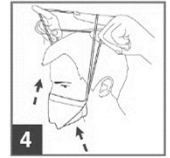

4
Legen Sie die Maske unter das Kinn und ziehen Sie die Gummibänder mit Daumen und Zeigefinger über den Kopf

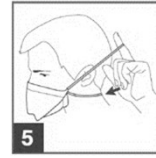

5
Lassen Sie das untere Gummiband los und positionieren Sie es am Halsende.

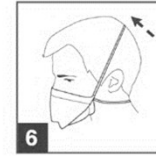

6
Positionieren Sie das 2. Gummiband auf der Oberseite des Kopfes



7
Stellen Sie den Nasensteg durch Drücken auf die Nasenflügel ein



8
Passen Sie die Maske an, bis sie perfekt auf dem Gesicht sitzt

SITZ- UND DICHTHEITSKONTROLLE:


Die Dichtheit der Maske muss vor der Verwendung überprüft werden. Knoten können im Gummiband gemacht werden, um seine Größe zu reduzieren, um eine bessere Abdichtung zu gewährleisten. So prüfen Sie, ob die Maske dicht sitzt:

- Setzen Sie Ihre Maske auf
- Stellen Sie den Nasenbügel ein
- Blasen Sie mit dem Mund, damit sich die Maske auflöst
- Wenn Luft auf der Nasenebene austritt, stellen Sie den Nasenclip erneut ein
- Wenn nach dem Einstellen des Nasenclips immer noch Luft austritt, wechseln Sie die Maske.

NORMALE LAGERBEDINGUNGEN



- Nicht in der Sonne lagern
- Vor UV-Licht geschützt lagern

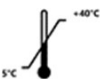

- An einem geschützten Ort lagern
- Bei Temperaturen zwischen 5°C und 40 °C lagern



- Nicht an einem feuchten Ort und vor schlechtem Wetter geschützt lagern
- An einem trockenen Ort lagern, an dem die Luftfeuchtigkeit unter 40 % liegt
- Die Maske vor Benutzung nicht befeuchten

Die Lagerbedingungen müssen regelmäßig überprüft werden

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN :



Einmalige Benutzung



Enthält kein Latex



Nicht steril



Herstellungsdatum



Verfallsdatum



Chargennummer



Referenznummer für die Maske



medizinische Vorrichtung



Nummer der UDI

SME, SF, SI Name der Zusammensetzungen Material

Partner und unterstützt durch :



Schützen Sie die Umwelt, indem Sie die gebrauchte Maske in einen Mülleimer werfen

Im Falle eines schweren Vorfalls im Zusammenhang mit diesem Produkt melden Sie den Vorfall dem Hersteller und der ANSM (www.ansm.santé.fr)

In Frankreich hergestelltes europäisches Erzeugnis

